


TIKER®

TIRE-TIQUE

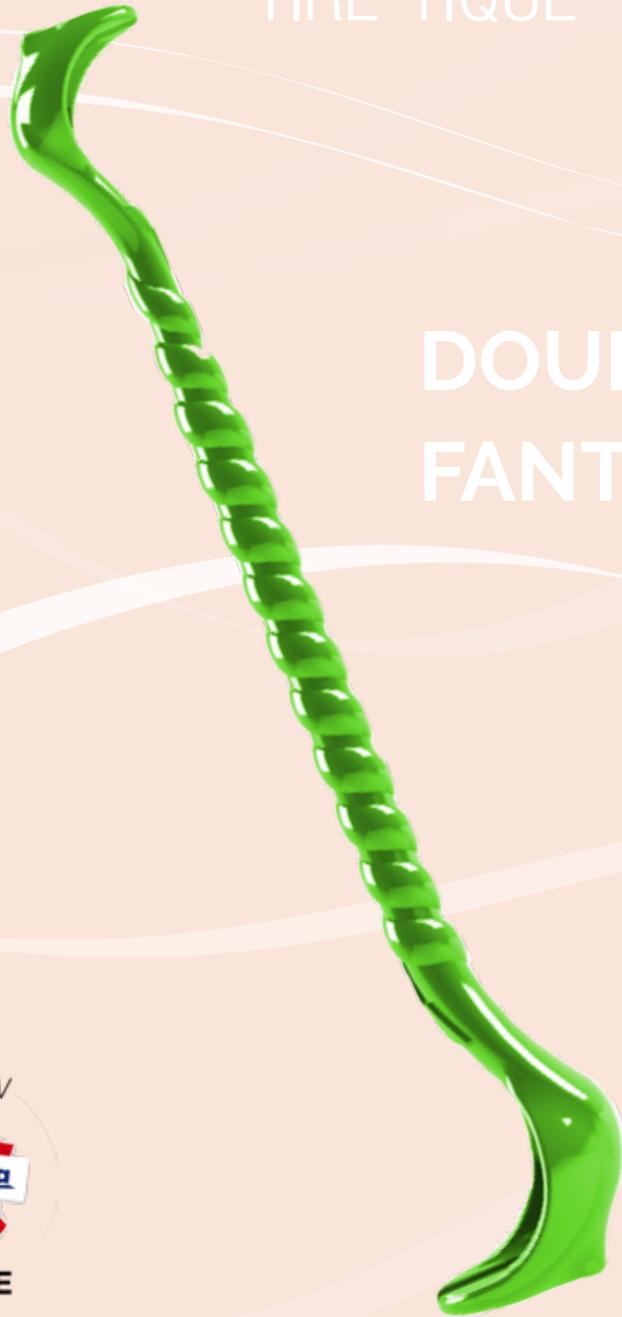

DOUBLEMENT
FANTASTIQUE!



I'm 
green™

Fabriqué en Green PE,
matière biosourcée 100% recyclable.
Emballage carton 100% recyclé.



injection



chirurgie



orthopédie



hospitalisation



capture



protection



hygiène



rurale



toiletage

génia
la référence vétérinaire

TIKER®

NOUVEAU

Pour retirer les tiques en toute sécurité ! Efficace et rapide ! Permet de retirer les tiques sur les animaux ou sur l'homme. Pratique grâce à ces deux tailles de cuillères placées tête-bêche permettant de retirer facilement les parasites de toutes tailles avec un unique instrument.

- Fabriqué en Green PE, matière biosourcée 100% recyclable. Emballage carton 100% recécologiquement recyclé.
- Rapide.
- Sans douleur.
- Hygiénique.
- Ne laisse pas le rostre (tête) de la tique sous la peau.
- La cuillère permet de retenir la tique le temps de l'éliminer.

Livré par 24 dans une boîte distributrice.


Code x 24	Modèle
191061	Tiker®



Retrouvez la version vidéo sur notre chaîne Youtube !




DOUBLEMENT FANTASTIQUE ET ÉCOLOGIQUE!

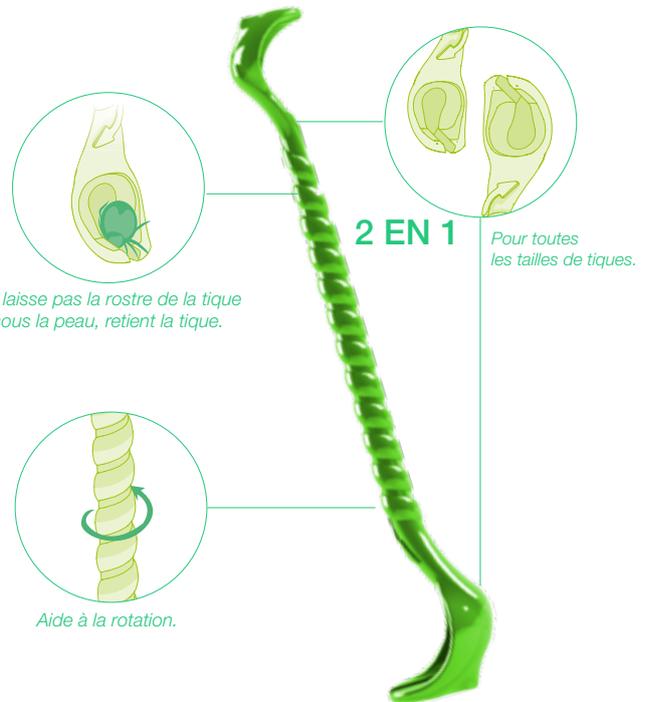


COMMENT UTILISER CORRECTEMENT LE TIKER®?

1. Choisir la taille de cuillère adaptée à la tique.
2. Insérer la cuillère sur le côté du parasite jusqu'à bien le saisir.
3. Tourner le Tiker® sans tirer, jusqu'à ce que la tique se détache.

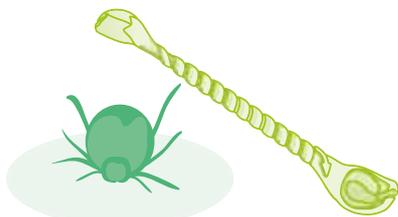

1.

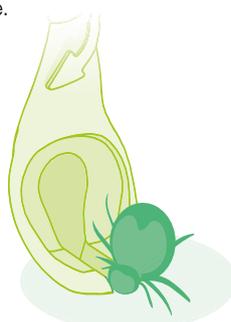

2.



3.

ATTENTION : La tique est un parasite qui peut transmettre de graves maladies telles que la Piroplasmose, l'Ehrlichiose et Lyme chez le chien. La Piroplasmose chez le cheval. La maladie de Lyme étant une zoonose l'Homme peut aussi être contaminé en cas de morsure de tique.

La maladie peut avoir été transmise avant le retrait du parasite. Le TIKER® ne peut prévenir cette transmission par conséquent en cas d'apparition de symptômes consulter immédiatement votre vétérinaire ou votre médecin traitant.


HOSPITALISATION